



A

B

C

D

E

F

A



B

C


D

E

CAD-System: SolidWorks

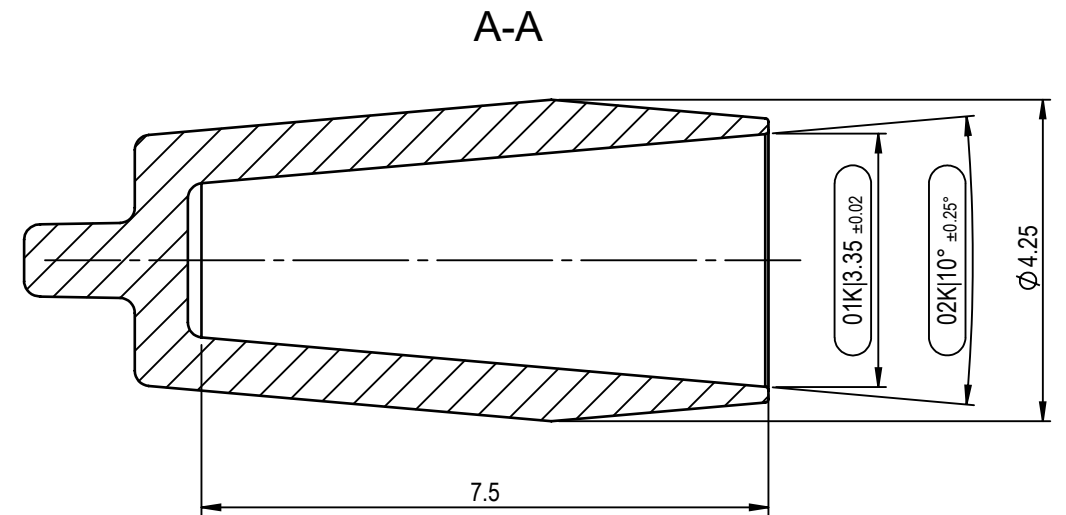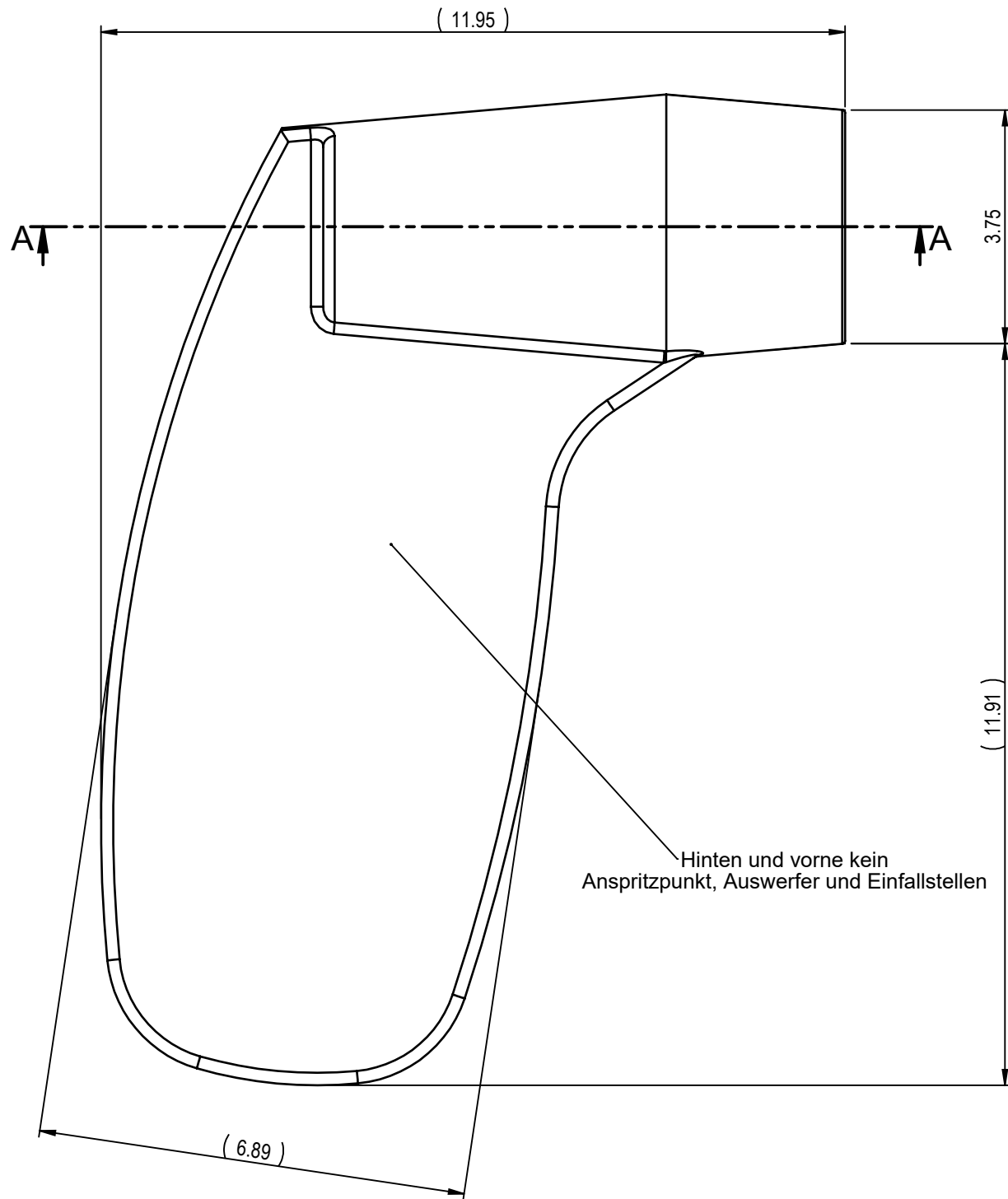

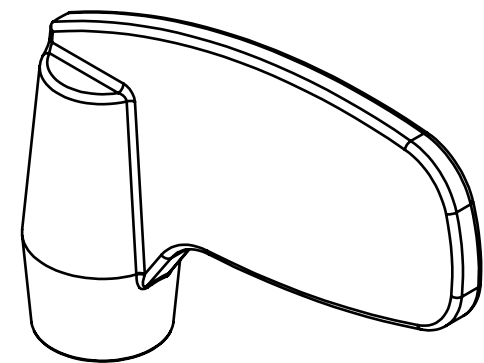

(5:1)



Farbe: RAL 8019 (braun)  
Volumen / volume: 0.126 cm<sup>3</sup>  
- Anspritzpunkt-Abriss nicht überstehend!  
- Werkzeugkonzept absprechen mit Technischem Kontakt Ihde Dental AG

Nicht vermasste Partien durch 3D Daten definiert  
Wandstärke: 0.7mm  
Kanten R0.05...R0.2  
Allgemeiner Anzug / general taper: 1°  
Ganzes Bauteil strichpoliert  
Keine Anspritzpunkte auf Sichtflächen!

14K|Dokumentationspflichtige Merkmale

POS		TOLERANZEN		Material				BEMERKUNG			
1		TG 3		POM							
Änderungen	-	12.09.2018 mro Initiale Version		Änderungen	-	-	Erstellt	03.07.2018	mro	Masstab  10:1	
	-				-	-	Geprüft	12.09.2018	mlz		
	-				-	-	Freigegeben		-		
	-				-	-	Auftrags-Nr.				
Ohne sep. Stückliste		<input type="checkbox"/>		Projekt		Status					
Sep. Stückliste gleicher Nr.		<input type="checkbox"/>				Ursprung					
Sep. Stückliste anderer Nr.		<input type="checkbox"/>		Sach- / Artikel-Nr.		Ersatz für					
				Benennung Scanbody 4 Intraoral					Zeichnungs-Nr. BM5126		Index a

Plotdatum: 19.09.2018