


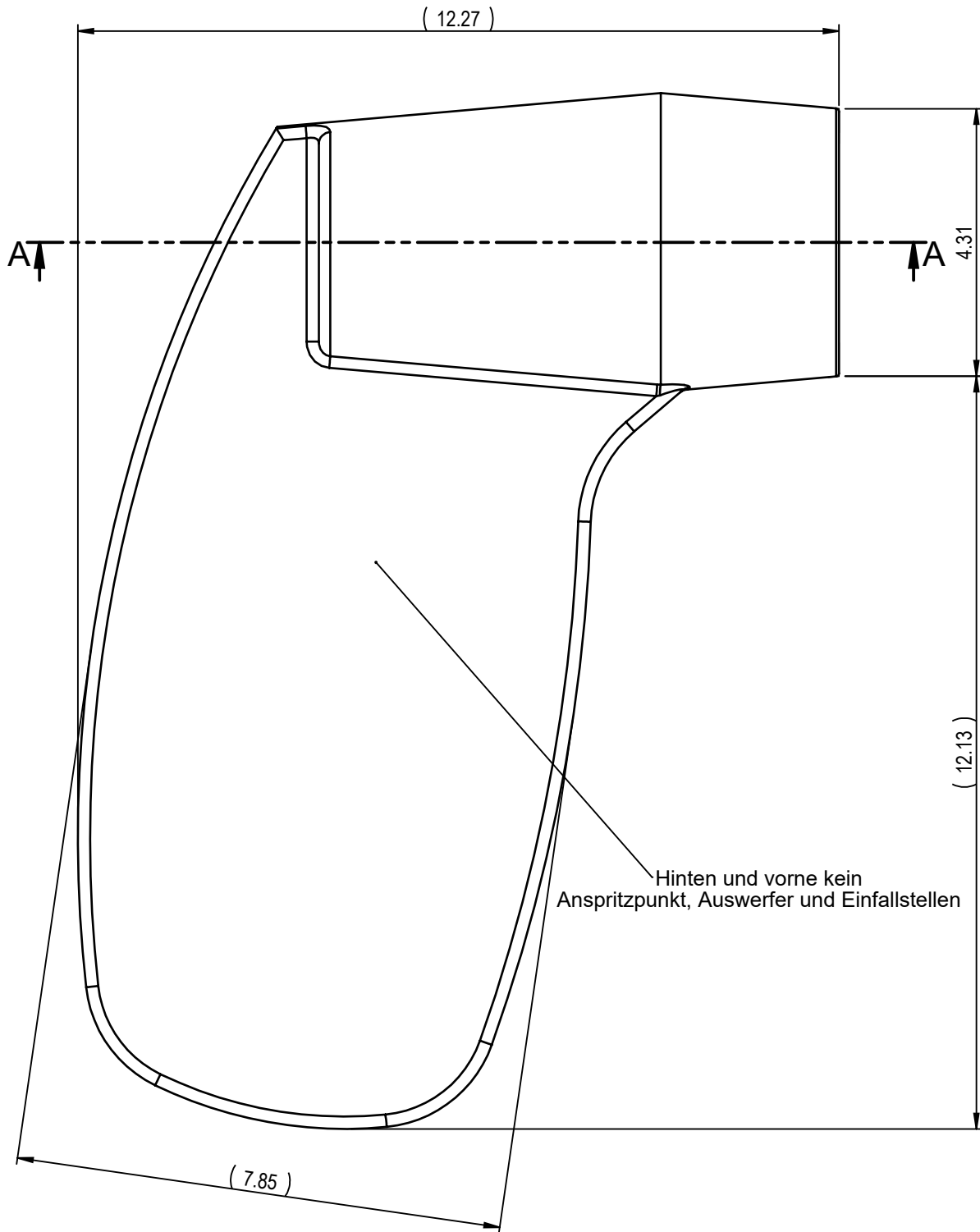


A
B
C
D
E
F




Farbe: RAL 9005 (schwarz)
Volumen / volume: 0.136 cm³
- Anspritzpunkt-Abriss nicht überstehend!
- Werkzeugkonzept absprechen mit Technischem Kontakt Ihde Dental AG

Nicht vermasste Partien durch 3D Daten definiert
Wandstärke: 0.7mm
Kanten R0.05...R0.2
Allgemeiner Anzug / general taper: 1°
Ganzes Bauteil strichpoliert
Keine Anspritzpunkte auf Sichtflächen!

14K|Dokumentationspflichtige Merkmale

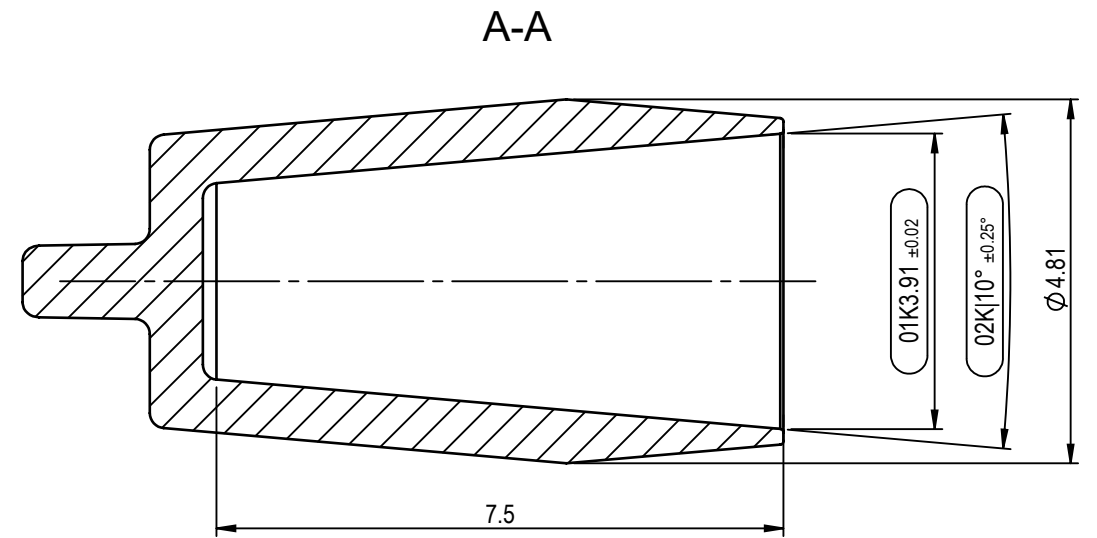

(5:1)

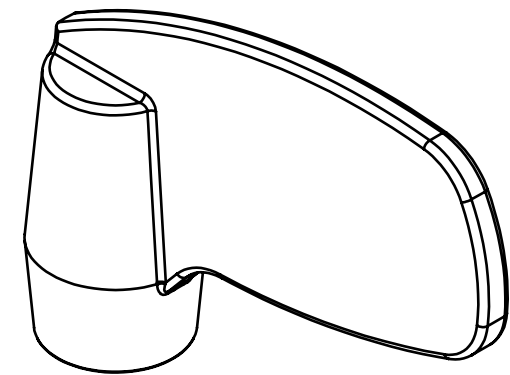

POS		TOLERANZEN		Material				BEMERKUNG			
1		TG 3		POM							
Änderungen	-	12.09.2018 mro Initiale Version		Änderungen	-	-	Erstellt	03.07.2018	mro	Massstab 10:1	
	-				-	-	Geprüft	12.09.2018	mlz		
	-				-	-	Freigegeben		-		
	-				-	-	Auftrags-Nr.				
Ohne sep. Stückliste		<input type="checkbox"/>	Projekt				Status				
Sep. Stückliste gleicher Nr.		<input type="checkbox"/>					Ursprung				
Sep. Stückliste anderer Nr.		<input type="checkbox"/>	Sach- / Artikel-Nr.				Ersatz für				
IHDE DENTAL				Benennung				Zeichnungs-Nr.		Index	
Dr. Ihde Dental AG CH-8737 Gommiswald				Scanbody 5 Intraoral				462072		a	